

Descrição do produto

Nullscar® é uma placa adesiva de silicone 100% grau médico, macia, semioclusiva, com princípios ativos de óleo de rosa mosqueta e vitamina E em sua composição. Possui aderência prolongada, reutilizável e é facilmente moldável ao corpo, sendo indicada para melhorar a aparência das cicatrizes, diminuir a vermelhidão, prevenir cicatrizes hipertróficas, queloidianas e alargadas. Além de minimizar o edema e promover maior conforto dos sintomas pós-operatório.

Composição do Produto

As placas Nullscar® levam em sua composição:

- Elastômero de silicone a base de dimetilpolisiloxano.
- Elastômero de silicone a base de dimetilpolisiloxano com complexos de platina.
- Óleo de Rosa Mosqueta.
- Óleo de Vitamina E.

Mecanismos de Ação

- **Ação Física**

Através da sua ação mecânica, a placa adesiva de silicone Nullscar® inibe a tensão da pele no local da cicatriz prevenindo o alargamento. A pressoterapia exercida pelo produto sobre a pele comprime os vasos sanguíneos da área tratada melhorando a aparência avermelhada da cicatriz e prevenindo hipertrofias.

A placa adesiva de silicone Nullscar® protege a cicatriz de atritos externos.

Quando utilizada no pós-operatório de lipoaspiração de papada, a pressão da placa adesiva de silicone Nullscar® na pele reduz o edema e estimula a aderência uniforme da pele aos planos profundos, promovendo maior conforto dos sintomas pós-operatórios.

- **Ação Bioquímica**

Óleo de rosa mosqueta conserva a textura da pele devido ao seu alto grau de emoliência e hidratação. Por ser rico em ácidos graxos insaturados, vitamina C e ácido transretinóico, o óleo também possui ação regeneradora.

A vitamina E exerce ação antioxidante e emoliente.

A oclusão da placa adesiva de silicone Nullscar® sobre a pele eleva a temperatura da cicatriz, promovendo o aumento de enzimas como colagenase. Esta enzima age normalizando o nível colágeno das cicatrizes, prevenindo o seu excesso como nos casos de cicatrizes hipertróficas e queloidianas.

Estabiliza os mastócitos, reduzindo o prurido (coceira).

O uso da placa adesiva de silicone Nullscar® mantém um nível ótimo de umidade na pele, proporcionando hidratação adequada na cicatriz, o que facilita a organização das fibras de colágeno.

Indicações Gerais

- Prevenir cicatrizes hipertróficas, queloidianas e alargadas;
- Indicada para minimizar atrito, prurido (coceira) e melhorar a vermelhidão;
- Aplicável em qualquer incisão cirúrgica na pele;
- Aplicável também para cicatrizes de queimadura e tatuagem;
- Nullscar® pode ser utilizada como coadjuvante nos tratamentos de queloides e hipertrofias já instaladas concomitante com uso de outras terapias.

Indicações Específicas

- **Nullscar® Abdômen:** Indicada para uso no pós-abdominoplastia e cirurgias no abdômen inferior.
- **Nullscar® Aréola:** Indicada para cicatrizes na região da aréola, ou cicatrizes que necessitem da redução de tensão nesta região.
- **Nullscar® Colo:** Indicada para a redução de rugas estáticas (Sleep Lines) ou após queimaduras na região do colo.
- **Nullscar® Mama L:** Indicada para cicatrizes de mamoplastias, mastopexias e cirurgias de reconstrução com cicatriz em L.
- **Nullscar® Órtese Umbilical:** Indicada para prevenir a estenose umbilical que pode acontecer após cirurgias como abdominoplastia, bariátricas, lipo de abdômen e cirurgias endoscópicas.
- **Nullscar® Placa Oclusiva:** Indicada para regiões do corpo que necessitem de diminuição de tensão e pressoterapia, redução de edema, hematomas em pós-operatórios e cicatrizes de queimadura.
- **Nullscar® Reta:** As indicações da Reta variam conforme o tamanho. A Reta S é indicada para pequenas incisões como na mamoplastias de aumento. A Reta M é indicada para incisões de cirurgias ortopédicas, braquiapexia, cirurgia dorsal, abdominal. E a Reta L é indicada para cirurgias de grande extensão como cirurgias na coluna ou cirurgias cardíacas.
- **Nullscar® T Invertido:** Indicada para cicatrizes de mamoplastias de redução, mastopexias e cirurgias de reconstrução com cicatriz em T invertido.
- **Nullscar® Tape 360:** Indicada para o pós cirurgias de abdômen que se estendem para a região lombar e pós cirurgias de abdômen invertido.
- **Nullscar® Tape Lift:** Indicada para o pós Lifting Facial, pós lipo de papada e otoplastia.
- **Nullscar® Tape Neck:** Indicada para o pós lipo de papada, pós lifting de sobrelanceiras e lifting cervical isolado, pós Emptiers e pós laser lipolítico.
- **Nullscar® Tape Slim Tabs:** Indicada para o pós cirurgias de tireoide, pós otoplastias e cirurgias menores em qualquer área do corpo com pouca tensão.

Contra Indicações

- Nunca utilizar a placa sobre suturas (ponto).
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade aos componentes.
- Nunca utilizar em feridas abertas, infectadas, exsudativas, crostosas e/ou mucosas. Caso a pele em torno da cicatriz esteja irritada, não utilizar a placa Nullscar®.
- Nunca utilizar em áreas de queimadura sem completa cicatrização e livre de exsudato.

- Nunca utilizar em cicatrizes com crostas e deiscências.
- Não utilizar em casa de hipersensibilidade a adesivos.

1.1. Precauções

- Não aplicar loções, pomadas, hidratantes ou produtos de tratamento de pele antes de fixar a placa sobre a pele para não interferir na aderência, com exceção de corticoide oclusivo quando indicado.
- Em casos de irritação na pele, suspender o uso da placa até a melhora dos sintomas, caso os sintomas persistam, procure orientação médica.

1.2. Recomendações Importantes / Advertências

- O produto e sua embalagem devem estar intactos, em caso de embalagem violada, o produto não deve ser utilizado.
- Este produto não é estéril.
- No início do uso, pode ser observado resíduo de adesivo com princípio ativo na pele, que pode ser removido com suave fricção.
- Seguir os cuidados adequados para armazenamento para evitar exposição da placa a agentes externos como talco, poeira, pelos ou óleos que interferem na adesividades.
- Obedecer o prazo de validade do produto
- Manter este produto fora do alcance de crianças.
- Durante o uso da placa Nullscar® Tape Neck pós-lipoaspiração, pode ser aplicado um pó compacto na parte externa da placa para adequar a cor da pele e evitar que o cabelo grude na parte externa, no caso de homens manter a barba bem aparada para uma efetiva adesividade na pele.
- Para garantir o efeito desejado, utilizar preferencialmente Nullscar® placa Colo ao deitar e diariamente, pois a vitamina E e o Óleo de Rosa Mosqueta proporcionam uma hidratação profunda na pele.

1.3. Reações Adversas

- São poucos efeitos adversos relatados como o uso de gel, fitas e/ou placas de silicone para tratamento de cicatrizes. No entanto, podem ocorrer na região coberta pelo produto reações como: prurido (coceira), dermatite de contato, irritações, erupções cutâneas e macerações.
- Se houver a ocorrência de alguma dessas reações recomenda-se reduzir o tempo de uso diário da placa adesiva de silicone Nullscar®, alternando com períodos de repouso. No caso de persistência de alguns desses sintomas, suspender o uso e consultar o médico.

1.4. Modo de Usar

- Com as mãos limpas, lavar gentilmente a área da cicatriz com água e sabão e secá-la antes de aplicar a placa adesiva de silicone Nullscar®. Sempre repetir a higienização da área cicatricial antes de reaplicar a placa;

- Retirar a placa Nullscar® da base plástica protetora onde ela está inserida;
- Esta base deve ser mantida para o armazenamento da placa nos intervalos de sua utilização;
- Aplicar a superfície colante da placa sobre a pele limpa, seca e sem cremes, aproximando as bordas da cicatriz, a fim de reduzir a tensão da pele;
- Para melhor adaptação da pele ao produto, iniciar o uso da placa adesiva de silicone Nullscar® por um período de 4 horas por 3 dias. O uso deve ser aumentado gradativamente, de 2 horas por dia até o uso mínimo de 8 horas;
- Ao fim do período de adaptação, seu uso recomendado deve ser de 8 a 12 horas, por no mínimo 3 meses, ou segundo a orientação médica;
- Embora a placa adesiva de silicone Nullscar® seja autoaderente, em áreas como membros superiores e inferiores, pode ser utilizado bandagem elástica para auxiliar na fixação da placa;
- Iniciar o tratamento com a placa adesiva de silicone Nullscar® preferencialmente a partir de 4 semanas e na ausência total de exsudatos ou crostas na cicatriz;
- Em caso de Lipoaspiração de papada, iniciar o tratamento com a placa Nullscar® Tape Neck após o segundo dia de pós operatório, aplicando – a cerca de 2cm abaixo dos pontos cirúrgicos, sobre a pele íntegra. Após a retirada dos pontos cirúrgicos, aplicar a placa NULLSCAR® Tape Neck sobre a cicatriz cirúrgica;
- Aplique a Nullscar® placa colo, sobre o colo com a pele limpa e seca de preferência no período da noite. Caso contrário, aplique por 2 horas para melhora da hidratação e das rugas estáticas.

1.5. Armazenamento e Cuidados Especiais

- Para reutilizar a placa adesiva de silicone Nullscar®, armazenar o produto em local seco e na base plástica protetora contida na embalagem;
- Recomenda-se fazer a limpeza da placa com água corrente e deixa-la secar naturalmente;
- A durabilidade da placa após uso é em média 30 dias, podendo ser utilizada enquanto durar a adesividade.
- O produto deve ser descartado em lixo comum. Evite descartar em locais inadequados ou jogá-lo na natureza.