

## **1. INSTRUÇÃO DE USO (BULA)**

### **1.1. Descrição do produto**

Nullscar® é uma placa adesiva de silicone, macia, semioclusiva, com princípios ativos de óleo de camomila e vitamina E em sua composição. Possui aderência prolongada, reutilizável e é facilmente moldável ao corpo, sendo indicada para prevenção de estrias ou alargamento de estrias já existentes, oclusão ocular, redução do edema malar e de pálpebras inferiores, além de promover maior conforto dos sintomas pós-operatório.

### **1.2. Composição do Produto**

As placas Nullscar® levam em sua composição:

- Elastômero de silicone a base de dimetil polisiloxano.
- Elastômero de silicone a base de dimetil polisiloxano com complexos de platina.
- Óleo de Camomila.
- Vitamina E.

### **1.3. Mecanismos de Ação**

#### **1.3.1. Ação Física**

- Através da sua ação mecânica, a placa NullScar® promove uma pressoterapia minimizando edemas e hematomas.
- A placa adesiva de silicone Nullscar® protege a pele de atritos externos.
- Nullscar® Tape Mommy melhora sustentação e inibe o estiramento da pele prevenindo estrias.

#### **1.3.2. Ação Bioquímica**

- O uso da placa adesiva de silicone Nullscar® mantém um nível ótimo de umidade na pele, proporcionando hidratação adequada, o que facilita a organização das fibras de colágeno.
- Óleo de camomila possui ação hidratante e emoliente combatendo o ressecamento, além de apresentar propriedades antialérgicas e anti-irritantes.
- A vitamina E exerce ação antioxidante e emoliente.
- Estabiliza os mastócitos, reduzindo o prurido (coceira).

### **1.4. Indicações**

- A camomila inserida na cola hidrata e acalma a pele.
- Tape Malar é indicada para prevenção e redução de edema malar e de pálpebras inferiores e para redução de hematoma.

- Tape Eye é indicada em terapias de lagofáltmico, estrabismo, ambliopia ou qualquer patologia que necessite oclusão ocular.
- Tape Mommy intensifica a hidratação da pele durante o último trimestre de gravidez, protegendo do estiramento rápido e abrupto das fibras dérmicas, prevenindo o aparecimento de estrias ou até mesmo o alargamento das pré-existentes e a diástase na gravidez, além de ajudar a diminuir a sensação de peso no baixo ventre nos últimos meses de gestação. No pós parto imediato, auxilia na acomodação dos órgãos internos até os músculos abdominais retornarem a sua força de contração.

### **1.5. Contra Indicações**

- Nunca utilizar a placa sobre suturas (pontos).
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade aos componentes.
- Nunca utilizar em feridas abertas, infectadas, exsudativas, crostosas e/ou mucosas. Caso a pele em torno da cicatriz esteja irritada, não utilizar a placa Nullscar®.
- Nunca utilizar em áreas de queimadura sem completa cicatrização e livre de exsudato.
- Prurido Gestacional.
- Não utilizar em casa de hipersensibilidade a adesivos.

### **1.6. Precauções**

- Não aplicar loções, pomadas, hidratantes, protetor solar, maquiagem ou produtos de tratamento de pele antes de fixar a placa sobre a pele para não interferir na aderência.
- Em casos de irritação na pele, suspender o uso da placa até a melhora dos sintomas, caso os sintomas persistam, procure orientação médica.

### **1.7. Recomendações Importantes / Advertências**

- O produto e sua embalagem devem estar intactos, em caso de embalagem violada, o produto não deve ser utilizado.
- Este produto não é estéril.
- No início do uso, pode ser observado resíduo de adesivo com princípio ativo na pele, que pode ser removido com suave fricção.
- Seguir os cuidados adequados para armazenamento para evitar exposição da placa a agentes externos como talco, poeira, pelos ou óleos que interferem na adesividades.
- Obedecer o prazo de validade do produto.
- Manter este produto fora do alcance de crianças.
- O uso da Tape Mommy deve ser iniciada no último trimestre da gravidez, ou seja, a partir da 26<sup>a</sup> ( vigésima sexta ) ou 27<sup>a</sup> (vigésima sétima) semana de gravidez: inicialmente por 4 horas diárias, e ir aumentando até atingir 8 a 12 horas por dia, podendo estender o tempo a critério da usuária;

### **1.8. Reações Adversas**

- São poucos efeitos adversos relatados como o uso de gel, fitas e/ou placas de silicone para tratamento de cicatrizes. No entanto, podem ocorrer na região coberta pelo produto reações como: prurido (coceira), dermatite de contato, irritações, erupções cutâneas e macerações.
- Se houver a ocorrência de alguma dessas reações recomenda-se reduzir o tempo de uso diário da placa adesiva de silicone Nullscar®, alternando com períodos de repouso. No caso de persistência de alguns desses sintomas, suspender o uso e consultar o médico.

### **1.9. Modo de Usar**

- Limpar a pele da região onde será aplicada a placa Nullscar®. Sempre repetir a higienização da pele antes de reaplicar a placa e manter a pele seca e sem produtos (cremes, maquiagem, filtro solar, etc).
- Retirar a placa Nullscar® da base plástica protetora onde ela está inserida. Esta base deve ser mantida para o armazenamento da placa nos intervalos de sua utilização;
- Para melhor adaptação da pele ao produto, iniciar o uso da placa adesiva de silicone Nullscar® por um período de 4 horas por 3 dias. O uso deve ser aumentado gradativamente, de 2 horas por dia até o uso mínimo de 8 horas;
- Ao fim do período de adaptação, seu uso diário recomendado deve ser de 8 a 12 horas;

### **1.10. Armazenamento e Cuidados Especiais**

- Para reutilizar a placa adesiva de silicone Nullscar®, armazenar o produto em local seco e na base plástica protetora contida na embalagem;
- Recomenda-se fazer a limpeza da placa com água corrente e deixa-la secar naturalmente ou usando tecidos que não solte fiapos;
- A durabilidade da placa após uso é em média 30 dias, podendo ser utilizada enquanto durar a adesividade.
- O produto deve ser descartado em lixo comum. Evite descartar em locais inadequados ou jogá-lo na natureza.